

Flexipet®ピペット 取扱説明書

注意:本品は、1細胞期 MEA を行っており、96 時間まで培養した時の胚盤胞形成率は 80%以上の基準をクリアしています。また、USP エンドトキシン(LAL)試験では、1 製品あたり 20EU 以下の基準をクリアしています。これら試験はロットごとに行っています。

禁忌・禁止: 既知の禁忌はありません。

使用上の注意:

- 併用される生殖補助医療のマイクロツール(及び、この操作中に配偶子、接合子、胚と直接接触するその他の付属品すべて)は、胚に適合する原材料で構成されていなければなりません。
- 女性患者集団の年齢が高い場合、排卵誘発が引き起こす異常により、あるいは *in vitro* での配偶子の操作によって、染色体異常及び先天性異常の合併症が生じる可能性があります。女性患者年齢の統計的補正を行うことにより、生殖補助医療に伴う異常の発生率は、一般集団の発生率とほぼ同等になります。

● Flexipet®ピペット - デニューディングピペット

1. 使用目的

本品は卵丘細胞を剥離するために使用します。単回使用です。

2. 推奨使用方法

- ① 本品を Flexipet®ハンドル(カタログ番号 K-MPH-1000)に取り付けます。
- ② 本品に卵子を吸引して出し入れし、卵丘細胞を剥離します。
- ③ 本品の先端をゆっくりとティッシュから出します。
- ④ ホルダから取り外し、廃棄処分してください。

● Flexipet®ピペット - マニピュレーションピペット

1. 使用目的

本品は卵丘細胞・卵子複合体の操作に使用します。単回使用です。

2. 推奨使用方法

- ① 本品を Flexipet®ハンドル(カタログ番号 K-MPH-1000)に取り付けます。
- ② 本品に卵子を吸引して操作、移動等を行います。
- ③ 卵子を解放し、本品の先端をゆっくりとティッシュから引き戻します。
- ④ ホルダから取り外し、廃棄処分してください。

製品の包装

ガンマ線滅菌済みのピールオープン式の包装で供給されます。

本品は単回使用製品です。本品の包装が未開封または破損していない場合は滅菌されています。滅菌状態が疑われる場合は使用しないでください。日光への長時間の暴露は避けて乾燥した冷暗所に保管してください。包装から取り出し、製品に破損がないことを確認してください。

《輸入元》



クックメディカルジャパン合同会社
電話番号:0120-289-902

《販売元》



株式会社 東機貿
電話番号:03-5762-7328

販売元

株式会社 東機貿

受注センター	tel.0120-956-629	fax.0120-956-648
営業本部 〒140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビル内		
産婦人科製品営業部(本社)	tel.03-5762-7327	fax.03-5762-7329
札幌営業所	tel.011-789-6350	fax.011-789-6351
仙台営業所	tel.022-782-3216	fax.022-782-3226
名古屋営業所	tel.052-800-0073	fax.052-800-0079
大阪支店	tel.078-854-6027	fax.078-854-6028
福山営業所	tel.084-930-6311	fax.084-930-6312
福岡支店	tel.092-271-4695	fax.092-271-4669

tokibo.co.jp